

Active®

פרוטוקול טיפול

פטרות ציפורניים



שימוש במכשיר SPIRIT

כל הזכויות שמורות לאקטיב מערכות אופטיות בע"מ



## התוויה

טיפול זה מחייב התייעצות עם דרמטולוג על מנת לוודא כי הטיפול נעשה בפטרת ציפורניים בלבד ולא באבחנה רפואית אחרת.

## מה זה פטרת ציפורניים

פטרת הציפורניים (אוניכומיקוזיס) היא נגע זיהומי המופיע בעיקר בציפורני הרגליים הנגרמת ע"י פטריות. הפטרת הינה תופעה מוכרת ושכיחה המופיעה בעיקר במקומות לחים שאינם חשופים לשמש, במקומות חסרי הגיינה בסיסית כמו במקלחות ציבוריות או בנעילת נעליים סגורות ללא איוורור. כל אלה מהווים מקומות אידיאליים להתפתחות הפטרת.

במקומות בהן מופיעה הפטרת נוכל להבחין בשינוי צבע וצורה. צבען של הציפורניים יהפוך לגוון צהבהב ואף חומות, תלוי במידת חומרת הפטרת. אי טיפול בפטרת עלולה להביא להיפרדות הציפורן מעריסתה. חשוב לטפל בתופעת הפטרת בשלביה המוקדים כדי למנוע נזקים לעור בסביבת הציפורניים.

האם ציפורן נגועה יכולה להדביק ציפורניים נוספות?

הפטרת היא זיהום מדבק ועל כן במידה וציפורן אחת נדבקה בזיהום, היא עלולה לעבור אל האצבעות הנוספות.

## כיצד נוצרת פטרת ציפורניים

הגורמים להיווצרות פטרת ציפורניים:

- מקום לח וסגור - כר מושלם ליצירה והתפתחות פטרת ציפורניים.
- גיל מבוגר - ציפורניים עבות יותר וזרימת דם איטית.
- חבלה בציפורן - פגיעה בשלמות הציפורן.
- מחלות רקע - סכרת ופסוריאזיס עלולות לגרום לזרימת דם איטית.

על מנת לטפל בפטרת יש לגרום לייבוש האיזור ולנטרל את תנאי הסביבה המזינה אותה.

# טיפול בפטרת בעזרת SPT

ידית הלייזר מותאמת לגודל האזור הנגוע ומאפשרת טיפול נקודתי בריכוז אנרגיית חום מתחת לפני העור. בעזרת קרני לייזר מדוייקות בשיטת ה-SPT "נייבש" את האזור סביב הפטרייה ובכך נאפשר לגוף להגיב ולפתח את מנגנוני ההגנה שלו ולנדף את הפטרת מהגוף.

הטיפול מתבצע במס' פולסים עוקבים לאיזור הנגוע, תוך שמירה על הפסקה ביניהם המאפשרת לרקמה להתאושש מכמות החום שנאגרה בה. מומלץ לבצע 5-6 פולסים במרווח קבוע וקצר.

## כיצד עובד הטיפול?

התאים סופגים את אנרגיית האור. אנרגייה זו הופכת לאנרגיית חום וגורמת לייבוש האזור הנגוע ולנטרול הפטרת.

## יתרונות הטיפול



טיפול מהיר ומדויק.



טיפול ללא תופעות לוואי.



ניתן לבצע את הטיפול בכל עונות השנה.



טיפול ממוקד לתוצאות מושלמות.




# תהליך הטיפול בעזרת מכשיר



מס' טיפולים: כ-4  
הפסקה בין טיפולים: 4 ימים.  
משך הטיפול כ - 5-6 פולסים.

- ננקה את הציפורן בצורה המקסימלית ביותר – חייבים להסיר לק.
- מומלץ לשייף וללטש את הציפורן לפני הטיפול.
- אין צורך למרוח גל.
- נגלה רק את הציפורן הנגועה בעזרת חבישה היקפית של תחבושת לבנה, על מנת לא לטפל באיזורים בריאים.
- יש להגדיר עוצמה 5 ומהירות בינוני במסך SPT.
- יש לקרב את הידית כ 1-2 ס"מ מעל הציפורן. **חשוב** – הידית לא נוגעת בציפורן.
- נשחרר פולסים רציפים עד שהמטופל מרגיש שהוא אינו יכול לסבול את הכאב ובאופן אינסטינקטיבי יזיז את הרגל'יד – כך נדע שקרני האור חדרו את כל השכבות של הפטריה עד לתחתית והתחלנו בתהליך ייבוש הפטריה.
- נחזור על הפעולה הזאת 3-4 פעמים בכל ציפורן.

## לאחר הטיפול

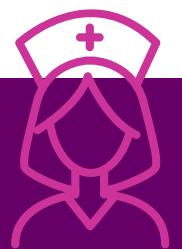

ניתן לחזור לשיגרה היומיומית לאחר כל טיפול.  
יש לשמור על סביבה נקייה גם במהלך הטיפול ולאחריו.  
את תוצאות הטיפול נראה במהלך 6 חודשים לאחר הטיפול האחרון.


### חשוב לדעת:

תוצאות הטיפול אינן נראות במקום, אלא בחודשים לאחר הטיפול  
ובהתאם לחומרת הפטרת.

# תוצאות טיפול



## אקטיב מערכות אופטיות בע"מ

שׁוהם 11, קרית מטלון, פתח תקווה  
טל. 03-9236610 | [www.active-lasers.com](http://www.active-lasers.com)  
חפשו אותנו בפייסבוק  אקטיב מערכות אופטיות בע"מ

Active®